



Épaulière Thuasne sport

Maintient l'épaule fragilisée par une blessure, tendinite ou luxation.



| | |
|-------------------|--------|
| Code Style | 057605 |
|-------------------|--------|

| | |
|------------------------------|-------|
| Référence Commerciale | P3700 |
|------------------------------|-------|

| | |
|-------------------|----------|
| Model code | EPAUNEO2 |
|-------------------|----------|

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Type de produit | Dispositif médical Classe I |
|------------------------|-----------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| Fabricant légal | Thuasne 120, rue Marius AUFAN 92300 Levallois-Perret France |
|------------------------|--|





Caractéristiques du produit

Couleur



Noir

Taille



Taille S



Taille M



Taille L

Description produit

L'épaulière Thuasne sport contribue au maintien de l'épaule pendant l'activité sportive (par exemple football, athlétisme, basketball...). Elle est conçue pour les épaules fragilisées par un traumatisme, une luxation ou un état inflammatoire comme la tendinite. Elle est adaptée pour maintenir l'épaule instable lors la reprise du sport, en prévention des luxations ou subluxations de l'épaule. Sa conception anatomique en tissu élastique recouvre l'épaule et les coutures plates offrent plus de confort.. La mise en place est facilitée et ajustable grâce à la sangle de maintien.

Mode d'action

- Maintien de l'épaule grâce au tissu élastique
- Confort grâce aux coutures plates
- Découpe anatomique pour accompagner le mouvement de l'épaule

Indications

- Traumatismes ou états inflammatoires de l'épaule et/ou du coude
- Prévention de la subluxation ou luxation de l'épaule (instabilité articulaire)
- Luxation de l'épaule
- Indice de maintien 1/5.

Utilisation simple

Ouvrir la sangle auto-agrippante, la passer dans la boucle arrière et la fixer sur l'autoagrippant. Enfiler le bras dans l'épaulière, faire passer la sangle sous l'aisselle du bras opposé et venir la passer dans la boucle avant de l'épaulière. Ajuster et fixer la sangle sur l'auto-agrippant. Le produit est ambidextre.

Tailles

Disponible en 3 tailles : S, M et L.



Prise de mesure : circonférence du biceps.
Pour être efficace, l'épaulière doit coller à la peau.

Produit bilatéral : L'épaulière convient aux deux épaules.

Informations complémentaires

Composition : polyamide, élasthanne, caoutchouc synthétique (CR).

Entretien : lavage en machine à 30 °C (cycle délicat).

Fermer les auto-agrippants avant lavage.

Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...).

Ne pas nettoyer à sec.

Ne pas utiliser de sèche-linge.

Ne pas repasser.

Essorer par pression.

Sécher à plat.

Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...).

Précautions d'emploi

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.

Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles.

Consulter un professionnel de santé :

- en cas de doute avant utilisation. - en cas de diagnostic incertain. Consulter un professionnel de santé et arrêter l'utilisation du dispositif : - en cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de sensations anormales. - en cas de modification des performances du dispositif.

Pour des raisons d'hygiène, sécurité et de performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient.

Ne pas mettre le dispositif en contact direct avec un corps gras (pommade, crème...). Une immobilisation prolongée peut parfois entraîner une perte de tonus musculaire. Si le dispositif est porté pour de longues périodes, s'assurer que la circulation sanguine n'est pas entravée.

Il est recommandé de serrer de manière adéquate le dispositif afin d'assurer un maintien/une immobilisation sans limitation de la circulation sanguine.

Ne pas utiliser le dispositif lors de la conduite d'un véhicule.

Contre-indications

Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain.

Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Ne pas utiliser en cas de fractures complexes ou chirurgicales de l'épaule, ou en cas de fractures des côtes.

Ne pas utiliser dans certaines situations post-opératoires (fractures multiples, pose de broches, fractures ouvertes, etc.).

Lire attentivement les instructions d'utilisation, indications et contre-indications du produit. En cas de doute, consultez un professionnel de santé. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de



cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Thuasne - 120 rue Marius AUFAN 92300 Levallois - Perret. 05/2024

Référence : 057605

Articles

| Article | SKU | EAN13 |
|---|----------------|-----------------|
| Épaulière Thuasne sport · Noir · Taille S | 05760520100399 | 31117 9007291 1 |
| Épaulière Thuasne sport · Noir · Taille M | 05760520200399 | 31117 9007292 8 |
| Épaulière Thuasne sport · Noir · Taille L | 05760520300399 | 31117 9007293 5 |