

Kit Hygiène

Référence : HYIPK03



Comprenant :

- 1 boîte de 20 comprimés Protanet
- 1 boîte de 12 lingettes individuelles

Notice :

PROTASEPT


Nettoyage de l'embout auriculaire

L'utilisation des lingettes PROTASEPT permet d'éliminer le cérumen efficacement sans dommage sur les composants.

Une utilisation quotidienne est recommandée.

1. Ouvrir le sachet et sortir la serviette nettoyante PROTASEPT.
2. Envelopper l'embout et l'appareil dans la serviette PROTASEPT.
3. Après avoir laissé le produit agir 1 minute, les aides auditives ou les embouts doivent être séchés avec un tissu propre et absorbant.

Un nettoyage quotidien est fortement recommandé pour un fonctionnement optimal. Après utilisation, jeter la serviette PROTASEPT.

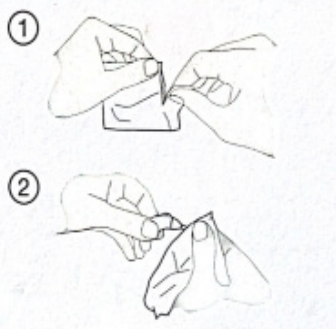

Précaution d'emploi: Usage externe.
Tenir hors de portée des enfants. Après usage, essuyer les aides auditives avec un tissu propre et absorbant.

PROTANET


Nettoyage de l'embout auriculaire

Comprimés de nettoyage pour des embouts auriculaires. 30 minutes suffisent pour une élimination efficace du cérumen. Les embouts auriculaires et les événements (aérations) obstrués par le cérumen diminuent la qualité sonore.

Pour remédier à cela : Retirer le tamis du gobelet. Remplir le gobelet d'eau tiède et ajouter le comprimé de nettoyage effervescent PROTANET.

Détacher l'embout auriculaire de l'aide auditive. Ne jamais plonger dans l'eau une aide auditive. Poser l'embout dans le tamis et remettre ce dernier dans le gobelet pendant 30 minutes. Puis, retirer le tamis avec l'embout et le rincer sous l'eau tiède.

Essuyer l'embout et sécher les aérations avec la poire, de manière à éliminer complètement l'humidité. Il est recommandé d'effectuer un nettoyage complet des embouts auriculaires 1 à 2 fois par semaine.

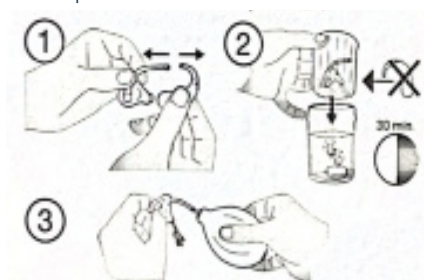

Précaution d'emploi: Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions oculaires. Usage externe. Usage unique. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Nocif pour les organismes aquatiques. Eviter le rejet dans l'environnement. En cas de consultations d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

En cas d'ingestion : appeler un centre anti-poison / un médecin. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.



EAROW BY PRODWAYS - **NÎMES**
1 Route d'Aubais - CS 30255
30111 CONGENIES
Tél. : 33 (0) 466.80.22.89

EAROW BY PRODWAYS - **LYON**
2, impasse Maurice Ravel
69330 JONAGE
Tél. : 33 (0) 472.37.12.70

EAROW BY PRODWAYS - **ROUEN**
67, Rue Charles Lindbergh 76520
BOOS
Tél. : 33 (0) 2 35 60 57 24